

Na het druppelen



Draai de witte of gele dop met de groene opener weer op het flesje.

Om het lege flesje te vervangen drukt u met uw duim op het dopje (zonder de groene opener) waardoor het flesje door de opening aan de achterzijde van de Xal-Ease wordt geduwd. Zet uw nieuwe flesje Xalatan of Xalacom in de Xal-Ease zoals hierboven beschreven.

Reinigen van Xal-Ease

Droog reinigen. Laat het flesje in de Xal-Ease zitten en reinig met een droge doek.

Nat reinigen. Verwijder het flesje. De Xal-Ease kan gereinigd en gespoeld worden met lauwwarm water en zeep.

Xal-Ease®

De Xal-Ease is een hulpmiddel uitsluitend bedoeld voor toediening van Xalatan of Xalacom, lees voor gebruik ervan de gebruiksaanwijzing.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op internet:
www.xalatan.nl - www.xalease.nl - www.glaucoomvereniging.nl



Postbus 37
2900 AA Capelle aan de IJssel
www.pfizer.nl

Medische vragen over een Pfizer-geneesmiddel?
Bel gratis 0800 MEDINFO (633 46 36)

Gebruiksaanwijzing



Xal-Ease®

De makkelijke manier om Xalatan of Xalacom toe te dienen.

Een hulpmiddel, speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en nauwkeurige dosering.



De Xal-Ease gebruiksklaar maken

Was uw handen.



Verwijder de buitenste (doorzichtige) bescherm-dop van het flesje Xalatan of Xalacom. Hiervoor kunt u ook de groene opener gebruiken. Deze dop kunt u weggooien.



Plaats het flesje aan de achterkant van de Xal-Ease en druk het stevig aan. Controleer of het flesje goed vast zit.



Draai de witte (Xalatan) of gele (Xalacom) dop van het flesje met behulp van de groene opener.

Druppelen met de Xal-Ease



Neem de Xal-Ease in uw hand en trek met uw andere hand het onderste ooglid iets naar beneden.



Plaats de Xal-Ease over het oog. Buig uw hoofd voldoende naar achteren zodat de Xal-Ease recht boven het oog staat. Druk één keer op de groene knop. De druppel valt in uw oog.



Sluit het oog en druk de traanbuis in de ooghoek even dicht.